

Gebruikershandleiding bij uw Twice PRO fauteuil.



# Handleiding voor het gebruik van uw TWICE PRO fauteuil

Gefeliciteerd, u heeft gekozen voor een relaxfauteuil uit de TWICE PRO serie. Na het lezen van deze handleiding wensen wij u veel relaxcomfort en plezier van uw fauteuil. Leest u dus voor het gebruik deze handleiding in zijn geheel aandachtig door.

## Inhoudsopgave

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pagina 2+3. | Bediening van de fauteuil (zonder opstahulp, met voetklep) d.m.v. tiptoetsen in de arm of zijpaneel. |
| pagina 4+5. | Bediening van de fauteuil (met opstahulp, met voetklep) d.m.v. tiptoetsen in de arm of zijpaneel.    |
| pagina 6.   | Bluetooth afstandsbediening - basisfuncties.                                                         |
| pagina 7.   | Bluetooth afstandsbediening - aanvullende opties. Instellen van de voorkeursposities                 |
| pagina 8.   | Het koppelen- en resetten van de Bluetooth afstandsbediening.                                        |
| pagina 8.   | Resetten van de fauteuil.                                                                            |
| pagina 9.   | Gebruik van de accu.                                                                                 |
| pagina 10.  | Bekleding leder.                                                                                     |
| pagina 11.  | Bekleding stof.                                                                                      |
| Pagina 12.  | Algemeen.                                                                                            |

## 1.1 Plaatsen

- De fauteuil dient op een vlakke vloer geplaatst te worden. Indien een fauteuil niet op een vlakke vloer staat veroorzaakt dat schade aan het verstelmechanisme en kan dat een krakend verstelmechanisme tot gevolg hebben. Houdt u, bij het verplaatsen van de fauteuil, rekening met de vloer. Bij krasgevoelige vloeren is het raadzaam om viltjes onder de voet van de fauteuil te plakken om beschadigingen te voorkomen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen aan de vloer, veroorzaakt door de fauteuil. Til uw fauteuil nooit boven aan de armen op. Bij het verplaatsen van de fauteuil tilt u deze aan de onderzijde van de armen of het zijpaneel op.
- **Indien uw fauteuil is voorzien van een accu dient u deze, nadat de fauteuil is uitgepakt, circa 6 tot 8 uur op te laden. Vanuit de fabriek is de accu niet volledig opgeladen. Bij punt 4.3 leest u hoe u de accu kunt opladen.**
- Voorkom dat u uw fauteuil in direct zonlicht plaatst of nabij een openhaard / houtkachel. Dit om verkleuring en / of vervorming van de fauteuil te voorkomen.

## 1.2 Veiligheid

- Let er bij het bedienen van de fauteuil op dat kinderen of huisdieren niet bekneld kunnen raken tussen de bewegende delen. Laat kinderen de fauteuil niet bedienen of ermee spelen !
- De fauteuils met sta-op hulp zijn voorzien van een rem (tandwiel) die de fauteuil "vast" zetten als de sta-op functie gebruikt wordt. Indien u uit de fauteuil wilt stappen of in de fauteuil wilt gaan zitten op het moment dat de fauteuil in de sta-op functie staat, mag u dat alleen doen als de fauteuil "vast" staat en niet meer kan draaien! Als de fauteuil niet "vast" staat is er een kans dat de fauteuil draait, waardoor u zich niet kunt afzetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en / of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van de sta-op functie.

## 2. Tiptoetsbediening.

In de binnenzijde van de arm of bij sommige modellen aan de zijkant van de zitting vindt u de tiptoetsbediening waarmee u de fauteuil bedient.

De tiptoetsbediening kan zowel in zilver als zwart zijn uitgevoerd. De kleur is afhankelijk van de voet die u gekozen heeft.


Afhankelijk van de opties die u gekozen heeft in de fauteuil, hebben we verschillende uitvoeringen. Uit onderstaand schema kunt u opmaken welke uitleg voor u van toepassing is

|                                               |                                                              |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Uw fauteuil heeft geen sta-op functie:</u> | ==> U heeft geen extra opties                                | ==> lees uitleg 2.1        |
|                                               | ==> U heeft als optie een elektrische topswing               | ==> lees uitleg 2.1 en 2.2 |
|                                               | ==> U heeft als optie een elektrisch opblaasbare lendensteun | ==> lees uitleg 2.3        |
|                                               | ==> U heeft beide bovengenoemde opties                       | ==> lees uitleg 2.3 en 2.4 |

|                                              |                                                              |                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Uw fauteuil heeft een sta-op functie:</u> | ==> U heeft geen extra opties                                | ==> lees uitleg 2.5        |
|                                              | ==> U heeft als optie een elektrische topswing               | ==> lees uitleg 2.5 en 2.6 |
|                                              | ==> U heeft als optie een elektrisch opblaasbare lendensteun | ==> lees uitleg 2.7        |
|                                              | ==> U heeft beide bovengenoemde opties                       | ==> lees uitleg 2.7 en 2.8 |

### 2.1 Bediening van de fauteuil (zonder opstahulp) d.m.v. van de tiptoetsen in de arm of zitpaneel.

Uw fauteuil heeft 3 motoren maar geen extra optie. Uw bedieningspaneel heeft 4 toetsen.

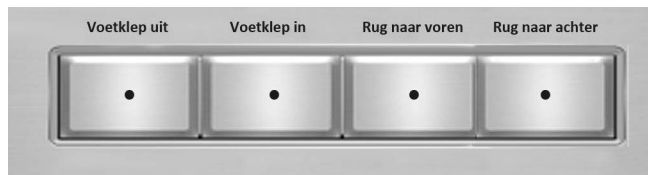

De eerste toets is voor het bedienen van de voetensteun. Als u op de toets drukt zal de voetensteun uitklappen; als de voetensteun geheel is uitgeklapt zal de fauteuil verder in de hartbalans bewegen.

De tweede toets is voor het bedienen van de voetensteun. Als u op de toets drukt zal de voetensteun inklappen; als de fauteuil in hartbalans stand staat zal eerst de zitting terugkeren naar de standaard positie. Hierna zal de voetensteun weer inklappen.

De derde toets is voor het bedienen van de rug. Als u op de toets drukt zal de rugleuning naar voren bewegen.

De vierde toets is voor het bedienen van de rug. Als u op de toets drukt zal de rugleuning naar achteren bewegen.



De middelste twee toetsen zijn voor het bedienen van de zitting kanteling. Drukt u op de middelste twee toetsen dan kantelt de zitting naar hartbalans positie zonder de voetensteun uit te klappen. Door alleen op de tweede toets te drukken beweegt de hartbalans functie weer terug naar de originele positie.

## 2.2 Bediening van de optionele elektrische topswing d.m.v. de tiptoetsen in de arm of zitpaneel.

Uw fauteuil heeft 3 motoren met elektrische topswing. Uw bedieningspaneel heeft 4 toetsen.



Voor het bedienen van de elektrische topswing dient u twee knoppen tegelijk in te drukken. Bij het indrukken van de voorste twee toetsen, beweegt de topswing naar voren. Bij het indrukken van de twee achterste toetsen beweegt de topswing naar achteren.

## 2.3 Bediening van de fauteuil met optionele opblaasbare lendensteun d.m.v. de tiptoetsen in de arm of zitpaneel.

Uw fauteuil heeft de optie opblaasbare lendensteun. Uw bedieningspaneel heeft 5 toetsen.



De eerste toets is voor het bedienen van de voetensteun. Als u op de toets drukt zal de voetensteun uitklappen; als de voetensteun geheel is uitgeklapt zal de fauteuil verder in de hartbalans bewegen.

De tweede toets is voor het bedienen van de voetensteun. Als u op de toets drukt zal de voetensteun inklappen; als de fauteuil in hartbalans stand staat zal eerst de zitting terugkeren naar de standaard positie. Hierna zal de voetensteun weer inklappen.

De derde toets is voor het bedienen van de rug. Als u op de toets drukt zal de rugleuning naar voren bewegen.

De vierde toets is voor het bedienen van de rug. Als u op de toets drukt zal de rugleuning naar achteren bewegen.


De vijfde toets is voor het bedienen van de elektrisch opblaasbare lendensteun. Drukt u op deze toets dan zal de lendensteun worden opgeblazen. Laat u de toets los en drukt u dezelfde toets vervolgens weer in dan zal de lendensteun weer leeglopen.



De tweede- en derde toets zijn voor het bedienen van de zitting kanteling. Drukt u op deze twee toetsen dan kantelt de zitting naar hartbalans positie zonder de voetensteun uit te klappen. Door alleen op de tweede toets te drukken beweegt de hartbalans functie weer terug naar de originele positie.

## 2.4 Bediening van de optionele elektrische topswing d.m.v. de tiptoetsen in de arm of zitpaneel.


Uw fauteuil heeft 3 motoren met elektrische topswing. Uw bedieningspaneel heeft 5 toetsen.

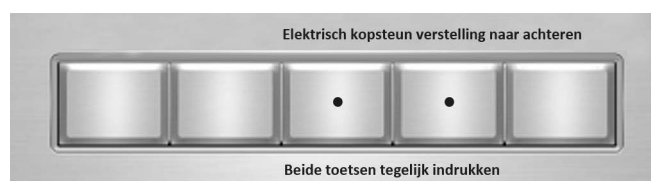

Voor het bedienen van de elektrische topswing dient u twee knoppen tegelijk in te drukken. Bij het indrukken van de voorste twee toetsen, beweegt de topswing naar voren. Bij het indrukken van de derde- en vierde toets beweegt de topswing naar achteren.

## 2.5 Bediening van de fauteuil (met opstahulp) d.m.v. de tiptoetsen in de arm of zitpaneel.

Uw fauteuil heeft 3 motoren en sta-op functie maar geen extra optie. Uw bedieningspaneel heeft 4 toetsen.

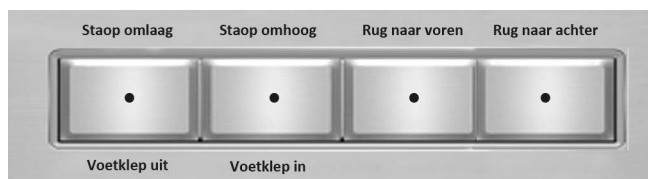

De eerste toets is voor het bedienen van de voetensteun en staophulp. Als u op deze toets drukt (terwijl de zitting in normale zitpositie staat) zal de voetensteun uitklappen; als de voetensteun geheel is uitgeklapt zal de fauteuil verder in de hartbalans bewegen. Wanneer de fauteuil in staop stand staat, drukt u op toets 1 om de fauteuil weer naar beneden te bewegen.

**U kunt de staophulp alleen bedienen als de voetklep volledig is ingeklapt.**

De tweede toets is voor het bedienen van de voetensteun en staophulp. Als u op deze toets drukt zal de voetensteun inklappen; als de fauteuil in hartbalans stand staat zal eerst de zitting terugkeren naar de standaard positie. Hierna zal de voetensteun weer inklappen. Staat de zitpositie in neutrale stand dan zal de fauteuil bij het indrukken van toets 2 omhoog bewegen. **De staophulp kan alleen bediend worden als de voetklep volledig is ingeklapt.**

De derde toets is voor het bedienen van de rug. Als u op de toets drukt zal de rugleuning naar voren bewegen.

De vierde toets is voor het bedienen van de rug. Als u op de toets drukt zal de rugleuning naar achteren bewegen.



De middelste twee toetsen zijn voor het bedienen van de zitting kanteling. Drukt u op de middelste twee toetsen dan kantelt de zitting naar hartbalans positie zonder de voetensteun uit te klappen. Door alleen op de tweede toets te drukken beweegt de hartbalans functie weer terug naar de originele positie.

## 2.6 Bediening van de optionele elektrische topswing d.m.v. de tiptoetsen in de arm of zitpaneel.

Uw fauteuil heeft 3 motoren met elektrische topswing. Uw bedieningspaneel heeft 4 toetsen.



Voor het bedienen van de elektrische topswing dient u twee knoppen tegelijk in te drukken. Bij het indrukken van de voorste twee toetsen, beweegt de topswing naar voren. Bij het indrukken van de derde- en vierde toets beweegt de topswing naar achteren.

## 2.7 Bediening van de fauteuil met staophulp en optionele opblaasbare lendensteun d.m.v. de tiptoetsen in de arm of zitpaneel.

Uw fauteuil heeft de optie opblaasbare lendensteun. Uw bedieningspaneel heeft 5 toetsen.



De eerste toets is voor het bedienen van de voetensteun en staophulp. Als u op deze toets drukt (terwijl de zitting in normale zitpositie staat) zal de voetensteun uitklappen; als de voetensteun geheel is uitgeklapt zal de fauteuil verder in de hartbalans bewegen. Indien de staop hulp in de hoogste positie staat kunt u met deze toets de staop hulp weer in normale zitpositie brengen. **U kunt de staophulp alleen bedienen als de voetklep volledig is ingeklapt.**

De tweede toets is voor het bedienen van de voetensteun en staophulp. Als u op deze toets drukt zal de voetensteun inklappen; als de fauteuil in hartbalans stand staat zal eerst de zitting terugkeren naar de standaard positie. Hierna zal de voetensteun weer inklappen. Drukt u daarna nogmaals op deze toets, dan zal de staophulp omhoogkomen. **De staophulp kan alleen bediend worden als de voetklep volledig is ingeklapt.**

De derde toets is voor het bedienen van de rug. Als u op de toets drukt zal de rugleuning naar voren bewegen.

De vierde toets is voor het bedienen van de rug. Als u op de toets drukt zal de rugleuning naar achteren bewegen.


De vijfde toets is voor het bedienen van de elektrisch opblaasbare lendensteun. Drukt u op deze toets dan zal de lendensteun worden opgeblazen. Laat u de toetsen los en drukt u dezelfde toetsen vervolgens weer in dan zal de lendensteun weer leeglopen.



De tweede- en derde toets zijn voor het bedienen van de zitting kanteling. Drukt u op deze twee toetsen dan kantelt de zitting naar hartbalans positie zonder de voetensteun uit te klappen. Door alleen op de tweede toets te drukken beweegt de hartbalans functie weer terug naar de originele positie.

## 2.8 Bediening van de optionele elektrische topswing d.m.v. de tiptoetsen in de arm of zitpaneel.

Uw fauteuil heeft 3 motoren met elektrische topswing. Uw bedieningspaneel heeft 5 toetsen.

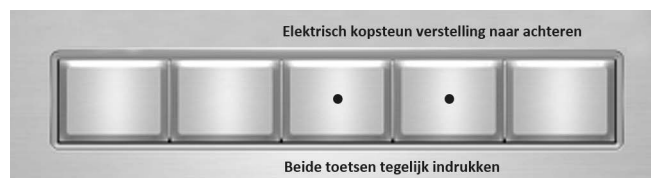

Voor het bedienen van de elektrische topswing dient u twee knoppen tegelijk in te drukken. Bij het indrukken van de voorste twee toetsen, beweegt de topswing naar voren. Bij het indrukken van de derde- en vierde toets beweegt de topswing naar achteren.

### 3. Bluetooth afstandsbediening.

#### 3.1 Bediening van de fauteuil door middel van een draadloze afstandsbediening

Indien u als extra gekozen heeft voor een draadloze afstandsbediening vervangt deze om veiligheidsredenen **NIET** de bedieningen in de arm of zitting. De afstandsbediening is leverbaar bij elke elektrisch verstelbare fauteuil (met- of zonder sta-op). Voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken, moet u deze voorzien van de meegeleverde batterijen.

Vergelijk onderstaande afstandsbedieningen met de afstandsbediening die u bij uw fauteuil heeft gekregen.



Dit is een overzicht van de basisfuncties: Rug, hartbalans, sta-op hulp en voetensteun.

| Functie                | Motor(en) | Icoon | Beschrijving van de functie                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rug                    | 3         |       | De rug beweegt naar achteren.                                                                                                                                                 |
|                        |           |       | De rug beweegt naar voren.                                                                                                                                                    |
| Hartbalans             | 2, 1      |       | De zitting kantelt achterover. Zodra deze achterover gekanteld is, komt de voetensteun onder de zitting vandaan.                                                              |
|                        |           |       | De zitting kantelt naar "home" positie. Zodra deze in "home" positie is aangekomen is, beweegt de voetensteun terug onder de zitting.                                         |
| Sta-ophulp (optioneel) | 2, 3      |       | De fauteuil wordt vanuit elke positie eerst in de "home" positie gebracht. Wordt de toets losgelaten en daarna opnieuw ingedrukt dan komt de fauteuil in de "sta-op" positie. |
|                        |           |       | De fauteuil wordt vanuit de "sta-op" positie teruggebracht naar de "home" positie.                                                                                            |
| Voetensteun            | 1, 2      |       | De voetklep klapt uit. Zodra deze volledig uitgeklappt is, zal motor 2 de zitting in "hartbalans" positie brengen.                                                            |
|                        |           |       | De voetklep klapt in. Zodra deze volledig is ingeklapt, zal motor 2 de zitting terug brengen naar de "home" positie.                                                          |

Dit is een overzicht van de optionele functies (toetsen): Home, hoofdsteun, lendenpomp en geheugenfuncties. De toetsen op deze pagina vind je alleen op de 15- en 17 knops afstandsbediening

| Functie                 | Motor(en)  | Icoon                                                                             | Beschrijving van de functie                                                                                  |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Home                    | 1, 2, 3, 4 |  | De fauteuil keert terug naar de “home” positie. Als de fauteuil al in “home” positie staat, gebeurt er niets |
|                         |            |                                                                                   |                                                                                                              |
| Hoofdsteun (optioneel)  | 4          |  | De hoofdsteun beweegt naar voren.                                                                            |
|                         |            |  | De hoofdsteun beweegt naar achteren                                                                          |
| Lendensteun (optioneel) | Pomp       |  | De lendensteun wordt opgeblazen.                                                                             |
|                         |            |  | De lendensteun loopt leeg.                                                                                   |
| Memory                  |            | <b>M</b>                                                                          | Voor het instellen van de memory functies. Zie uitleg bij alinea 3.2                                         |
|                         |            | <b>M1</b>                                                                         | Memorytoets 1; zie uitleg bij alinea 3.2                                                                     |
|                         |            | <b>M2</b>                                                                         | Memorytoets 2; zie uitleg bij alinea 3.2                                                                     |

### 3.2 Instellen van de voorkeursposities (**M1** en **M2**)\*

\* Deze functie zit alleen op de afstandbedieningen met 15 of 17 toetsen

Via de afstandsbediening heeft u de mogelijkheid twee favoriete instellingen van uw fauteuil vast te leggen. Voordat u uw voorkeursstand instelt, zet u uw fauteuil in de voorkeurspositie.

- Zet uw fauteuil in de gewenste voorkeurspositie.
- Druk 3 maal kort achter elkaar de toets **M** op de afstandsbediening in. De toetsen op de afstandsbediening knipperen nu.
- Druk nu eenmaal op de knop met de gewenste geheugen positie (**M1** of **M2**) om uw voorkeur vast te leggen.
- Een korte pieptoon bevestigt de gemaakte voorkeursinstelling.

Telkens als u de **M1** of **M2** toets ingedrukt houdt, beweegt de fauteuil naar de door u gekozen voorkeurspositie.



### 3.3 Het koppelen van de Bluetooth-afstandsbediening

De afstandsbediening is in de fabriek al ingelezen en aangepast aan uw fauteuil. Mocht de afstandsbediening niet werken, kijkt u dan eerst of de batterijen nog goed contact maken en vervang deze eventueel. Indien de afstandsbediening daarna nog niet werkt, kunt u deze opnieuw koppelen met de fauteuil.

**Heel belangrijk !!! Voor het opnieuw koppelen van de bluetooth afstandsbediening, dient deze eerst gereset te worden.**

Reset uitvoeren

- Druk de hieronder aangegeven toetsen tegelijk in op de afstandsbediening **en houd deze vast**



- De achtergrondverlichting aan de bovenzijde van de afstandsbediening gaat knipperen



- Zodra de verlichting stopt met knipperen en continue brandt is de reset voltooid.
- Laat pas **nu** de toetsen los.

#### Koppelen

Druk de tiptoetsen 1 en 3 op het bedieningspaneel in de fauteuil in gedurende ca. 10 seconden.



- De verlichting achter de tiptoetsen knipperen blauw.
- Druk nu eenmaal de aangewezen toetsen op de afstandsbediening kort in. Een korte pieptoon bevestigt de gemaakte koppeling.



### 3.4 Reset van uw fauteuil.

Indien uw fauteuil niet meer functioneert kan het zijn dat uw accu leeg is. Laad zoals omschreven is bij punt 4.3 de accu op. Wanneer de fauteuil nog niet functioneert kunt u een reset uitvoeren. Druk daarvoor meer dan 10 seconden de (eerste) drie toetsen van uw bedieningspaneel in. De lampjes achter de bediening gaan branden en één of meerdere motoren gaan bewegen gevolgd door een pieptoon. Hierna is de reset voltooid. Uw kunt uw fauteuil weer opnieuw gebruiken.

**Indien de fauteuil nog niet werkt neemt uw contact op met uw winkelier.**

## 4. Gebruik van de accu.

### 4.1 Eerste keer opladen voor het eerste gebruik.

De accu minstens 6 tot 8 uur lang opladen om zo de volledige gebruikscapaciteit te bereiken. De oplader kan gebruikt worden als trafo. U kunt de fauteuil continu aangesloten houden zonder dat de accu overladen wordt. Bedenkt u wel dat het continu aangesloten laten van de oplader invloed heeft op de levensduur van de accu.

### 4.2 Gebruik van de accu.

Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af. De gebruikstijd is van vele factoren afhankelijk zoals gewicht van de gebruiker, de omgevingstemperatuur en de gebruikintensiteit.

Terwijl u de fauteuil bedient door op het toetsenpaneel te drukken, branden de lampjes achter de toetsen op het bedieningspaneel blauw. Dit houdt in dat de accu voldoende capaciteit heeft. Branden de lampjes rood tijdens de bediening of klinkt er een pieptoon, dan dient u de accu zo spoedig mogelijk op te laden.

### 4.3 Het opladen van de accu

- De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar ligt tussen de 6 en 8 uur.
- Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de adapter/lader als teken dat deze op de netstroom / stopcontact aangesloten is.
- Voor het opladen koppelt u eerst de magneetlader aan de fauteuil. Daarna steekt u de stekker in het stopcontact. Na het opladen haalt u eerst de stekker uit het stopcontact en verwijderd u daarna de oplader van de fauteuil.
- Zodra u de oplader aan het oplaadpunt heeft gekoppeld, knipperen de lampjes achter het bedieningspaneel rood. Is de accu voor 30% opgeladen, dan gaan de lampjes blauw knipperen. Gaat u door met opladen totdat de accu vol is dan zullen de lampjes bij een volle acculading kortstondig blauw branden. Als de verlichting uitgaat, kunt u de oplader loskoppelen van de fauteuil.
- Tijdens het opladen van de fauteuil is deze normaal te gebruiken.



### 4.4 Algemene gebruikshandleiding accu

- **Belangrijk:** bij het opladen van een koude accu (5 graden of minder) dient u de accu minimaal een uur op kamertemperatuur te laten komen alvorens deze aan te sluiten op de oplader.
- De accu mag niet worden opgeladen bij temperaturen onder 0 graden en boven 40 graden celcius.
- Gebruik uw accu uitsluitend in goed geventileerde ruimtes.
- Gebruik uitsluitend de originele accu, kabels en adapter / oplader.
- Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden.
- De accu, kabels en adapter / oplader mogen niet gebruikt worden als deze beschadigingen vertonen. Indien er beschadigingen zijn, neemt u contact op met uw leverancier voor vervanging van deze onderdelen.
- De accu dient met de nodige zorgvuldigheid gebruikt te worden. Laat deze dus niet vallen of stoten en stel de accu niet bloot aan sterke vibraties.
- Stel uw accu niet bloot aan open vuur
- Probeer de accu niet open te maken.
- Dompel de accu niet onder water.
- Houd de accu buiten het bereik van kinderen.

### 4.5 Milieu

Gooi de accu aan het eind van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil, maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

**Belangrijk:** De accu dient ook bij géén of weinig gebruik minstens één keer in de 2 maanden volledig te worden opgeladen.

**Op de accu en de oplader zit een garantie van 1 jaar.**

## 5. Bekleding

### 5.1 Leder

Wij als Meubelfabriek de Toekomst bevelen de producten van Oranje Furniture Care of LCK aan.

#### LEDERONDERHOUD **Waarom moet leder onderhouden worden?**

- Leder heeft na het looien nog een vochtpercentage van ca. 12%. Door o.a. centrale verwarming en de invloed van licht kan het leder met de tijd gaan uitdrogen.
- Zonlicht en ook kunstlicht verbleken het leder. Vooral aniline en vintage leder (Afrika, Vintage, Rancho, Puur en Royal) zijn hier gevoelig voor.
- Door invloeden van UV straling verliezen aniline en vintage leder kleur en voelen hard en droog aan. Bij gepigmenteerd leder kan het craquelé veroorzaken.
- Door normaal dagelijks gebruik ontstaat er een zogenaamde gebruiksvervuiling op het leder. Deze vervuiling bestaat o.a. uit kledingdeeltjes, transpiratie, huidvetten en stof. Deze verstoppert de poriën van het leder en zetten zich vast in de nerf. Vetten kunnen onder invloed van licht in vetzuren veranderen. Het is ook mogelijk dat het leder reageert op een verhoogde zuurheidsgraad van de gebruiker. Dit zuur tast de toplaag van het leder aan.
- De schoonheid van het leder kan worden behouden door 2-4 maal\* per jaar met de Natural Leather Cleaner of Keralux® milde reiniger schoon te maken en het leder te beschermen met de geadviseerde protector of spray. Gelijktijdig kan een vroegtijdig verbleken van met name donkere aniline kleuren worden tegengegaan. Daarnaast adviseren wij u om plaatsen waar veel contact is met de huid, zoals op de armleuningen en hoofkussens, het leer wat vaker te reinigen met de Natural Leather Cleaner of Keralux® soft cleaner.

**Het juiste product eenvoudig vinden:** Op de website [www.relax-careproducts.nl](http://www.relax-careproducts.nl) of [www.oranjefurniturecare.com](http://www.oranjefurniturecare.com) vind je voor elke ledersoort de passende onderhoudsproducten.

**Schade door transpiratie, huidvetten en medicijn gebruik:** Er zijn tal van medicijnen die invloed nemen op de samenstelling van transpiratievocht. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij chemotherapie, is de link met beschadigde meubelen wel te leggen. Bij bloedverduuners, anti depressiva, en andere tabletten wordt er niet zo snel aan schadelijke bijwerkingen in de vorm van transpiratie gedacht. We gaan hier niet op de stoel van de arts zitten, maar de link met voornoemde medicijnen bestaat. Dat is buitengewoon vervelend voor de betrokkenen en helaas wordt de link ook vaak te laat gelegd. Met andere woorden, het kwaad is al geschied. Transpiratie en huidvetten kan leer donkerder kleuren, er ontstaat craquelé of de toplaag laat los. Dit zie je dan vooral op contactplekken met de huid. Typische plekken zijn de (voorzijde) van de armleuningen of de plek waar het hoofd op het leder rust.

**Wat kun je preventief doen in geval van transpiratie, huidvetten en medicijn gebruik?** Zorg dat die plekken de in aanraking met de huid komen, extra worden beschermd. Een andere mogelijkheid is om de frequentie van onderhoud te verhogen. Normaal adviseren we 2 x per jaar reinigen / voeden. Met Oranje of Keralux® producten kun je dit zonder problemen opvoeren naar wel 12 x per jaar. Daarbij is het reinigen net zo belangrijk als het voeden/beschermen. Bij de reiniging het schuim zijn werk laten doen. Niet hard gaan poetsen, maar even in laten werken en met een vochtige doek afnemen. Het Oranje of Keralux® product vervolgens dun en gelijkmatig aanbrengen. Let op, dun! Bij gepigmenteerde ledersoorten kun je het leder extra beschermen met Oranje Leather Care & Protect of Keralux® strong protector. De protector bevat speciale werkstoffen die uw glad lederen zitmeubel effectief en langdurig beschermen tegen vroegtijdige vervuiling.

Lederverzorgingsadviezen Oranje Furniture Care en LCK

#### Complete sets:

|                        |                                  |   |                |
|------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| Afgedekt leder         | Leather Care Kit Care & Protect  | - | Keralux set P  |
| Open / geschuurd leder | Leather Care Kit Brushed Leather | - | Keralux set Vi |
| Wax / Olie leder       | Leather Care Kit Wax & Oil       | - | Keralux set S  |

#### Losse flacons:

|                        |                           |   |                        |
|------------------------|---------------------------|---|------------------------|
| Reinigen standaard     | Natural Leather Cleaner   | - | Keralux milde reiniger |
| Reinigen krachtig      | Leather Strong Cleaner    | - | Keralux strong cleaner |
| Afgedekt leder         | Leather Care & Protect    | - | Keralux lotion P       |
| Open / geschuurd leder | Brushed Leather Protector | - | Keralux Spray N        |
|                        | Leather Vintage Lotion    | - | Keralux lotion Vi      |
| Wax / Olie leder       | Leather wax & oil         | - | Keralux lotion S       |

## Plooivorming

Doordat u gebruik maakt van uw fauteuil wordt het zichtbaar waar u zit. Leder rekt uit onder belasting, mede door de elasticiteit van het schuim. De zgn. zitspiegel tekent zich af op de zitting. Afhankelijk van het leder en de “hardheid” van de schuimmaterialen kan dit al na een aantal “zitbeurten” gaan aftekenen (zie afbeelding). Dit is een heel normaal verschijnsel. U kunt de zitspiegel beperken door dagelijks de zitting “glad” te strijken met uw handen. Ook in de rug tekent zich af dat de fauteuil gebruikt wordt. Deze rimpels worden ook wel leefplooien genoemd en hebben geen invloed op de levensduur van uw fauteuil. Leer is een fantastisch materiaal, dat in gebruik steeds mooier wordt !



## 5.2 Stof

### Onderhoud

Zuig het meubel wekelijks uit met een zogenaamd meubelmondstuk. Kleine zanddeeltjes zorgen voor een schurende werking waardoor de stof versneld zal slijten.

Onder invloed van zonlicht verkleurt elke stof na verloop van tijd in meer of in mindere mate. Katoenen stoffen zijn hier gevoeliger voor dan wollen stoffen. Over het algemeen verkleuren lichtere stoffen minder dan donkere kleuren. Het beste is om direct zonlicht op meubels zoveel mogelijk te vermijden.

Gestoffeerd op een bepaald model gedragen niet alle stoffen zich hetzelfde. Dit heeft vooral te maken met de rekbaarheid van de verschillende stoffen. Hoe minder elastisch de stof is, hoe duidelijker plooien zichtbaar worden op de fauteuil en de stiknaden.

## 5.3 Schuimstoffen

Het zitmeubel past zich aan uw lichaamsvorm aan. Op een hard oppervlak dient het lichaam zich aan te passen aan het meubel. Bij comfort zitmeubelen is dat juist omgekeerd. De schuimproducten passen zich langzaam aan; aan de gebruiksomstandigheden, zoals de dagelijkse gebruiksduur, temperatuur en lichaamsgewicht. De aanpassingsduur zal afhankelijk van het gebruik tot 6 maanden na ingebruikname kunnen duren. Na deze gebruikperiode is het maximale comfortniveau bereikt.

### *Polyurethaan-foam*

Polyurethaan-foam is de grondstof die voornamelijk het comfort bepaalt. In Nederland wordt dit product ook vaak koudschuim genoemd. Het materiaal is niet giftig, wordt CFK vrij geproduceerd en is recyclebaar. Een eigenschap van koudschuim is dat het aanvankelijk stug is, maar in het gebruik elastischer wordt. De stugheid daalt met ongeveer 15%. Op dit niveau stabiliseert het materiaal zich.

## 5.4 Algemeen

- Elke fauteuil wordt met de meeste zorg vervaardigd. De productie van een fauteuil is mensenwerk. Elke fauteuil wordt met de hand vervaardigd. Daarom is geen enkele fauteuil hetzelfde. Kleine uiterlijke verschillen zijn onvermijdelijk en onderschrijven de ambachtelijke productie van uw fauteuil(s).
- De meeste fauteuils zijn voorzien van een rits aan de achterzijde. Deze rits is nodig voor het stofferen. Het kan voorkomen dat deze zwarte rits zichtbaar is (zie afbeelding onder aan de pagina). Doordat er spanning staat op de hoes, kan de naad open gaan staan waardoor de rits zichtbaar wordt. Dit kan ook komen door de druk die het leder krijgt zodra er in de fauteuil gezeten wordt. Vooral op plekken waar meerdere delen leer bij elkaar komen kan de rits zichtbaar zijn. Dit is niet te voorkomen.
- Een relaxfauteuil bestaat uit veel bewegende delen, scharnieren en motoren. Daardoor zit er speling op uw fauteuil. Dit is heel normaal en doet niets af aan de kwaliteit of levensduur van uw fauteuil. Als u de voetensteun en rug achterover heeft is de speling het meest te voelen. Een staop functie heeft doorgaans meer speling dan een fauteuil zonder staop functie. Door de speling kan de fauteuil in sommige gevallen een krakend geluid geven bij het verstellen van de fauteuil.  
**Kraken kan ook veroorzaakt worden doordat de fauteuil op een niet vlakke ondergrond geplaatst is.**
- Verdeel uw gewicht over de zitting en de rug. Toch zou het kunnen zijn dat u meer naar rechts of meer naar links zit in uw fauteuil. Wees er dan ook van bewust dat uw fauteuil gaat “meebewegen”. Het kan daardoor zo zijn dat de hoes van uw fauteuil meer naar rechts of meer naar links (dus schuin) op de rug gaat liggen. De fauteuil vormt zich naar de gebruiker.
- Gebruik de armleggers van uw fauteuil niet als trapje, opstapje of zitplaats.
- De zitplaats is ongeschikt om er op te gaan staan. De vering wordt daar dan plaatselijk overbelast.
- Ga nooit met de knieën op de zitting over de rug heen kijken.

